

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-56933

No. 170206

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	寒川病院 様		機番	100632
環営	所在地	神奈川県高座郡寒川町宮山193		納入日	平成24年2月24日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成28年6月17日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成29年2月01日
計	3				

修理依頼・不具合内容

排水異常 頻発

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。下記ご報告いたします。

排水異常につきまして、排水ポンプを分解点検したところ、内部にプラスチック片が挟まっていた。これが原因で排水性能が低下して異常が発生しました。

この修理と合わせて 保守点検を実施しました。

写真1：排水ポンプ内のプラスチック片

写真2：定期交換部品



[2] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

[3] 出荷時の装置情報

交換後運転回数：507→3 消毒：5640、消毒+アルコール：3674、リークチェック：3671
自己洗浄：1054、アルコール単独：1、エア単独：7

承認



審査



作成

H29.2.6
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水ポンプ	1台	
	定期交換部品	1式	
	オゾン水濃度計、オゾンセンサー、触媒		
	脱気フィルター、水槽側コネクタ、排水栓		

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528