

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300778
作業年月日	平成 29 年 2 月 3 日	作業時間： Hr
顧客名	福島医院 様	TEL： 048-775-3111
所在地	埼玉県上尾市愛宕2-18-25	ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社	ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 2 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒

殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 4/11
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

非常にキレイに使用頂いてます。
特に問題はありません。

装置 情報	交換後運転回数： 160 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 3	殺菌/消毒+7L： 157
	リークチェック： 0	自己洗浄： 157	アルコール単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ガン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ガン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29.2.3

埼玉県上尾市愛宕二丁目18番25号

医療法人社団 福島医院

医師 福島 淳一

ご署名 〒362-0034 TEL 048-775-3111

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者

Ver.3.1