

保守点検・修理 報告書

(サ-ビス)

管理 No.

発行日 #####

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300539
作業年月日	平成 28 年 12 月 2 日		作業時間 : 約 1.5 Hr
顧客名	安藤病院 御中		TEL : 047-359-1201
所在地	千葉県市川市行徳駅前2-20-18		担当 様
販売店	(今サ-ビス)		担当 様
納入年月日	平成27年4月30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検パック作業依頼。

異常履歴 10/28, 12/1, 4回, 1/3 X 3回 すべて消毒時栓異常発生 (E202) 8
 ↳ 異常履歴は一度リセット致しました。

不具合原因、作業内容

定期保守点検パック作業依頼。(定期交換部品の交換)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルズ数 806
オゾンセンサ	正常 ☒ 出力0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 9.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

下記定期交換部品の交換実施。作動点検実施。⇒作動時に問題なし。
 異常履歴一度リセット致しました。

装置 情報	交換後運転回数 : 40 → 0 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 : 40	消毒+アル : 0
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 23	アルコール単独 : 0
			エア単独 : 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内蔵洗浄用ブロー	(白ブロー)	☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 12 月 2 日

ご署名

安藤 修 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

