

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成28年12月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100276	
作業年月日	平成28年12月6日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	駒込クリニック 様		TEL:	0475-92-8800	
所在地	千葉県大網白里市駒込1659-1		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成23年9月21日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
7-4バルブの反応がない。モーターの音がする。(作動している時)
作動中(酸素が回っていません)⇒メッセージ表示しない。(ホバ残量がない時)

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 380
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
7-4バルブ、コントロール基板、バリスタの交換及び取付実施。⇒作動問題なし。
不具合原因は7-4バルブ故障、基板のプログラムの可能性有。消毒履歴は2015, 9/7時点のものにのみ表示。

装置情報	交換後運転回数: 69	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+7L: 311
	リークチェック: 0	自己洗浄: 309	7Lコールド: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
7-4バルブ		☒	1			☐	
コントロール基板		☒	1			☐	
バリスタ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
H28 年 12 月 6 日
ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	