

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170213

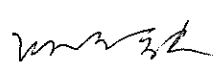
発行日：平成 29 年 2 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300497
作業年月日	平成 29 年 2 月 13 日	作業時間： Hr
顧客名	深澤クリニック 様	TEL： 028-676-0671
所在地	栃木県塩谷郡高根沢町1920-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 2 月 6 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2/7 9:35 ヒータ-センサー異常 (E107) , ヒータ異常 (E105)	
不具合原因、作業内容	
オゾン分解触媒用ヒータ及びヒータ-センサー(温度センサー)の信号系に不具合がありました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 335
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
コントロール基板を交換して復旧しました。これに伴い運転プログラムが Ver0204 → Ver 0207 になりました。使用方法に変化はありません。	

装置 情報	交換後運転回数： 56	更新 (リット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 44	殺菌/消毒+アル： 67
	リークチェック： 0	自己洗浄： 65	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィル		☒		コントロール基板		☒	1
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	