

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成28年12月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300419
作業年月日	平成 28 年 12 月 13 日		作業時間： 約1.5 Hr
顧客名	東伊興クリニック 様		TEL： 03-5691-7077
所在地	東京都足立区東伊興3-21-3		ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社 (5174-72)		ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 11 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/1 オバーフロー異常 (E205) 3, VILカセ-異常 (E214) 4 部原水汚水異常 (E209) 11
10/18 濃度制御注意 (E109)

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施 (4-72分 I)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 49816
オゾンセンサ	正常 ☐ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.12 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期交換部品交換実施。作動点検実施。異常履歴一度リセット致しました。
次回 H29 12月メンテナンス点検予定月です。(次回より有償)

装置情報	交換後運転回数： 62070 (更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 598	殺菌/消毒+7L： 512
	リークチェック： 2	自己洗浄： 408	7Lアルコール単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 12 月 13 日

ご署名 小林 亮 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
	