

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20170221

発行日：平成 29 年 2 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300206
作業年月日	平成 29 年 2 月 21 日	作業時間： Hr
顧客名	大原台クリニック 様	TEL： 0470-62-9500
所在地	千葉県いすみ市大原台424-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 2 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
平成29年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 残圧 13MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 635
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
・ 運転プログラムバージョンアップしました。使用方法の変更はありません	
・ 予備用としてアルコールキャップ返し	

装置情報	交換後運転回数： 551 更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+アル： 765
	リークチェック： 0 自己洗浄： 718	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1 個
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1 個
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	千葉県いすみ市大原台424-1
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	医療法人社団ジュノー会大原台クリニック
ご署名	土 居 暢 嗣

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中 澤 77.2.21	中 澤 77.2.21