

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170308
発行日：平成 29 年 3 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300749
作業年月日	平成 29 年 3 月 8 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	うがじんクリニック 様		TEL： 0276-40-1414
所在地	群馬県太田市飯塚町685-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 2 月 4 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
平成29年2月14日 保守点検実施 (2/16, 2/23 は異常なし)			
: 3月2日 ヒ-9-セ-サ-異常 (E107), ヒ-9 異常 (E105)			
: 3月4日 同上			
不具合原因、作業内容			
コントロール基板の不具合が原因で ヒ-9セ-サ-の信号を受け付けていませんでした。			
ヒ-9-は規定温度 (約60℃) まで上がり、正常でした。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 4.5MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未実施	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 225
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐ 未実施	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ ※
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 2P交換プラグ 取外し
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ ツジ CAS03
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
コントロール基板を交換して 復旧しました。基板の単純な故障と思われますが、電源側の交換プラグで外し、アースをできるようにしました。			

装置情報	交換後運転回数： 7	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 95	殺菌/消毒+7L： 227
	リークチェック： 0	自己洗浄： 195	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
ポン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☐		コントロール基板		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	1729 年 3 月 8 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	 印
ご署名	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
 中澤	 中澤

