

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 170320

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	金町成人病クリニック 様	機番	300818
環営	所在地	東京都葛飾区東金町 2-13-4	納入日	平成 28 年 3 月 10 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成 29 年 3 月 03 日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 29 年 3 月 20 日

修理依頼・不具合内容

- ・タッチパネルが「IHI OED-1000」の画面から次の画面へ移行しない
- ・アルコール消費量が設定より多い
- ・定期保守点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 不具合原因

- 1：タッチパネルにつきまして
異常が再現することを確認しました。コントロール基板からタッチパネルへ送る信号が不調で、画面が「IHI OED-1000」から次の「処理選択」に移行しませんでした。
コントロール基板単独の故障でありますので、念のためにタッチパネルも交換しました。
- 2：アルコール消費量につきまして
配管系統を点検しましたが、特に異常は見られませんでした。タッチパネル画面にてアルコール注入量を調整できますので、お試しください。（説明書 66 ページ）

写真 1：定期交換部品

写真 2：タッチパネル、コントロール基板



[2] 作業内容

- 1：修理部品と保守点検に伴う部品を交換しました・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・正常
- 3：出荷時の装置情報
交換後運転回数：2 消毒：49、消毒+アルコール：350、リークチェック：0 自己洗浄：210
アルコール単独：2、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	タッチパネル	1 台	
	定期交換部品	1 式	
	オゾン水濃度計、排水栓、オゾンセンサ、オゾン分解触媒、フィルタ		

承認

安
17.3.20
田

審査

中
17.3.20
澤

作成

H29. 3. 20
中澤

(株) IHI シパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528