

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100374
作業年月日	平成 25 年 12 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	水野胃腸科内科医院		TEL: 043-261-0613
所在地	千葉県千葉市中央区今井2-2-10		担当 様
販売店	株式会社 スズケン		担当 様
納入年月日	平成 23 年 12 月 1 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張 ・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 7/1 レンズ交換
 不具合はありませんでした。 11/26 オゾン水生成異常 (ホ: 215) 12/16

不具合原因、作業内容
 OED-1000 定期保守点検作業実施

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> ハルス数 347
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		正常	<input type="checkbox"/>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 Ver 0/07
 装置内部運転動作に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 706	更新 (リット) 実施・未実施	殺菌: 109	殺菌+アル: 1162
	リークチェック: 0	自己洗浄: 324	アルコール単独: /	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	/	内視鏡接続コネクタ		<input checked="" type="checkbox"/>	2
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	/			<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	/			<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	/			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	/			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
 25年 12月 17日
 ご署名 丸山 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	