

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170215
発行日：平成 29 年 2 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300761
作業年月日	平成 29 年 2 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	清水胃腸科内科クリニック 様		TEL： 027-360-4771
所在地	群馬県高崎市町屋町627-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 2 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

平成29年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 508
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	風乾プログラム	☐ Ver.0207 / T03C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

排水栓の清掃をお願いしよう → 

装置情報	交換後運転回数： 1116 → 0 更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1116	殺菌/消毒+7h： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 178	7hコール単独： 0
			エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	次回
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	次回
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29年2月15日
清水胃腸科・内科クリニック
院長 清水 直樹
ご署名 高崎市町屋町627 印 1
TEL027-360-4771 FAX027-360-4772

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	