

2) 1週間以上使用しないとき、装置を移動するとき

⚠ 注意

- 雑菌繁殖のおそれ
一週間以上装置を使用しないときは、残水を排水してください。
- 水漏れによる物損のおそれ
残水排水後はドレンコックを閉めてください。
- けがのおそれ
フロントパネルは外れやすいので、開閉は丁寧に行ってください。

注意)凍結が予想される時は、残水を排出してください。凍結による機械損傷のおそれがあります。

1

一日の最後のお手入れを実施してください。(P49 参照)

2


フロントパネルをはずしてください。(ずらさず、手で引いて)

3

電源スイッチを切ってください。


4

殺菌槽ドレンコックを回して、ドレン口から残水を排水してください。排水が終わったら、必ずもとに戻して(閉める)ください。

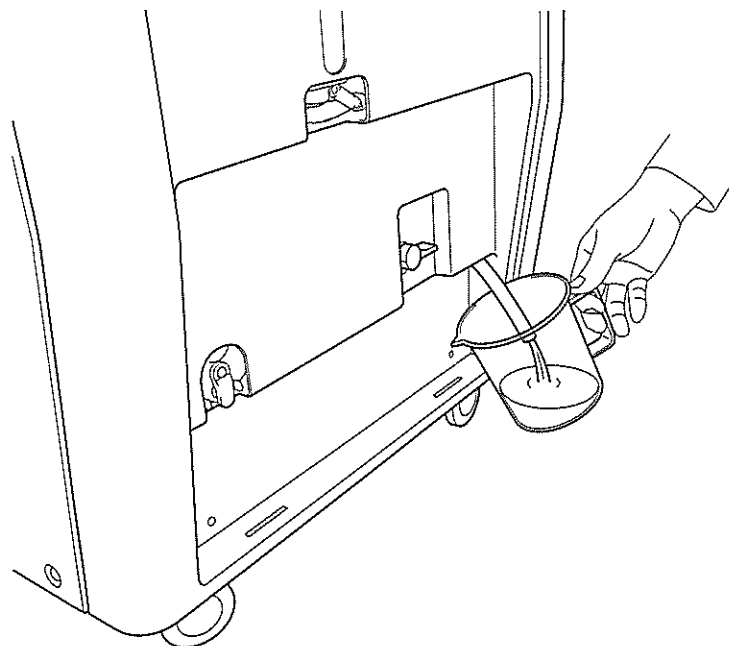


5

排水ポンプドレンキャップをはずして、残水を排水してください。排水が終わったら、必ずもとに戻して（閉める）ください。

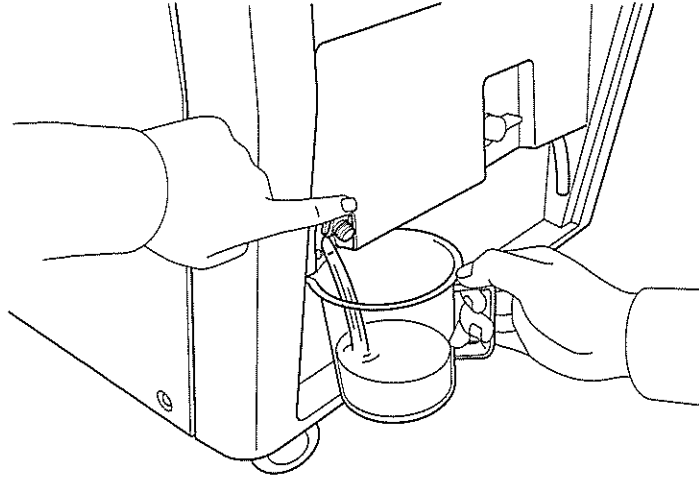

6

アルコールタンクドレンコックをまわして、アルコールを排液してください。排水が終わったら、必ずもとに戻して（閉める）ください。

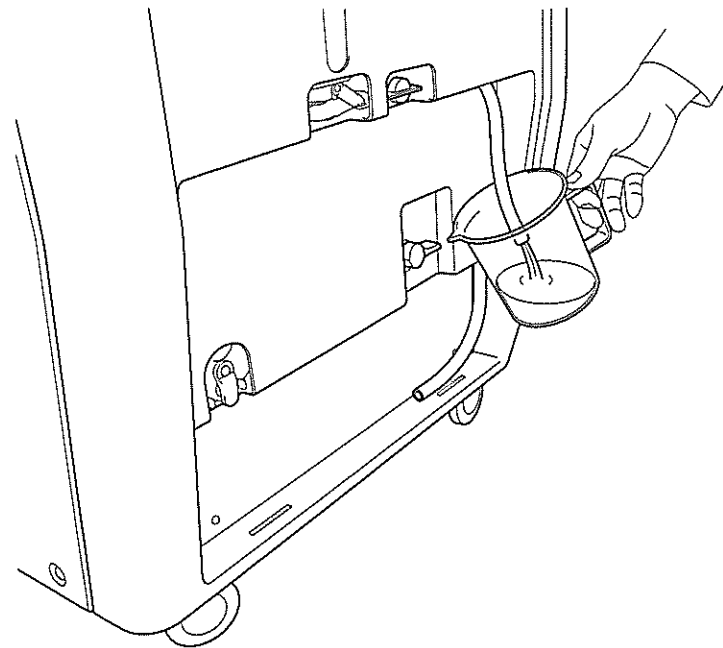

7

フロントパネルを取り付けてください。