

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170425

発行日：平成 29 年 4 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300403
作業年月日	平成 29 年 4 月 25 日		作業時間： 1.0 Hr
顧客名	鷺沼診療所 様		TEL： 044-855-9977
所在地	神奈川県川崎市宮前区有馬 1 丁目 2 番 1 6 号		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
ヒータ異常 (E105), ヒータセンサ異常 (E107) ヒータ分解触媒を暖める部品です。	
不具合原因、作業内容	
ヒータからの温度信号が「0℃」と正常値ではありませんでした。 信号系の不具合で、コントロール基板で交換して復旧しました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 残圧 5.5 MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 546
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒ 3-ス付
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
今年の 10 月が保守点検の時期です。よろしくお願いします。	

装置 情報	交換後運転回数： 306	更新 (リット) 実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 525	殺菌/消毒+7L： 834
	リークチェック： 0	自己洗浄： 211	アルコール単独： 119	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		コントロール基板		☒	1
オゾンセンサー		☐		Ver.0205 → Ver.0207		☐	

お客様ご確認署名欄	29 年 4 月 25 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	新田 絵美子 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
H29.4.25 	中澤