

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                 |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S                                                            |                                                                       | 製造番号: 300017      |
| 作業年月日 | 平成 27 年 3 月 13 日                                                                |                                                                       | 作業時間: Hr          |
| 顧客名   | いいぬまクリニック                                                                       |                                                                       | TEL: 0463-89-1555 |
| 所在地   | 神奈川県秦野市堀川173-1                                                                  |                                                                       | 担当 様              |
| 販売店   |                                                                                 |                                                                       | 担当 様              |
| 納入年月日 | 平成 25 年 3 月 7 日                                                                 | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張/引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水注水 (点:111) 4/8 4/9 x2 4/23 排水異常 (点:401) 4/23  
 オーバーフロー異常 (点:205) + レベルセンサー異常 (点:214) 6/10 x2 10/21 11/4 2/17  
 光量低下異常 (点:210) + テンプレアホ異常 (点:212) 2/10

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

|          |    |                                                                                 |           |    |                                                                                                                             |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | 消毒槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 403                                                                                |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm                                                                             |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 7/18 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                         |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | 消毒チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 7/27 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 4/17 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 消毒槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |           |    |                                                                                                                             |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

4-7 交換 コレクターの部品交換

|          |               |                  |            |          |
|----------|---------------|------------------|------------|----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: /003 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: /929   | 消毒+アル: 0 |
|          | リークチェック: 0    | 自己洗浄: 7/18       | アルコール単独: 0 | エア単独: 0  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水用制御バルブ  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 4/17 正常   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 27 年 3 月 13 日

ご署名 飯田 克博 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
 東京都文京区本郷3-12-5  
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

