

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300217
作業年月日	平成 27 年 2 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	平嶋胃腸科眼科		TEL: 03-3698-1241
所在地	東京都江戸川区東瑞江1-26-13		担当 様
販売店	株式会社スズケン		担当 様
納入年月日	平成 26 年 2 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水管 (K111) 5/26 5/30 6/3 6/9 6/12
排水管 2 (K1402) 5/30 排水管 1 (K1401) 6/12

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 758
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

左 - ア接続コネクタが灰色の部品に交換されました。

装置 情報	交換後運転回数: 171	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 47	消毒+7L: 128
	リークチェック: 0	自己洗浄: 62	アルコール単独: 0	エア単独: 87

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	排水管用新型接続管		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 2 月 19 日

ご署名 平嶋 乙三

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

