

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100673
作業年月日	平成 27 年 2 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	ふたむら内科クリニック		TEL: 048-540-6635
所在地	埼玉県鴻巣市天神4-6-35		担当 様
販売店	ニスコ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 25 年 2 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合、異常はなし			
不具合原因、作業内容			
OED-1000定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 375
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ エアライン調整
清掃	正常 ☒ フタ内清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	70ml	正常 ☒ E63000/100
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項（メンテナンス使用）			
洗浄がたまりやまらなくて、前面パネル、ホリイスタンドに錆びが少しある。オゾン排水栓、70ml洗浄			
チューブ接続 1本70mlが壊れた			

装置 情報	交換後運転回数: 538	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 1140	殺菌+70ml: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 494	70ml単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 2 月 16 日

吉田 香織

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本