

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                                 |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                             | 製造番号: 100438                                                          |
| 作業年月日 | 平成 27 年 2 月 4 日                                                                                 | 作業時間: Hr                                                              |
| 顧客名   | 飯能靖和病院                                                                                          | TEL: 042-974-2311                                                     |
| 所在地   | 埼玉県飯能市下加治137-2                                                                                  | 担当 様                                                                  |
| 販売店   | 株式会社エーエムアイ                                                                                      | 担当 様                                                                  |
| 納入年月日 | 平成 24 年 2 月 23 日                                                                                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 <u>3</u> 回 <u>3</u> 回目 | 定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし。

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 <u>217</u>    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 <u>0.75</u> ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾンホース    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続工程が反色ワ部品にカサりました。フロントフェイスはOK。

|          |                    |                |                   |                 |
|----------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: <u>11</u> | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌: <u>43</u>     | 殺菌+アル: <u>0</u> |
|          | リークチェック: <u>0</u>  | 自己洗浄: <u>3</u> | アルコール単独: <u>0</u> | エア単独: <u>2</u>  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量       |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----------|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 内視鏡接続コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>2</u> |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |           |       | <input type="checkbox"/>            |          |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |           |       | <input type="checkbox"/>            |          |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |           |       | <input type="checkbox"/>            |          |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |           |       | <input type="checkbox"/>            |          |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 2 月 4 日

ご署名

小坂孝行

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

山本