

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300149
作業年月日	平成 26 年 11 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	山田クリニック		TEL: 0287-48-121
所在地	栃木県矢板市片岡2146-3		担当 様
販売店	有限会社メディック		担当 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/20 排水注意 (E:111) 排水異常 (E:801)
9/2 排水異常 (E:802)

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒	バルブ数 551
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	履歴 0.73 ppm
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒	消毒チューブ類
トレー	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒	
消毒槽コネクタ	正常	☒		正常	☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタ、排水栓の部品は交換した。

装置 情報	交換後運転回数: 529	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 271	消毒+7L: 258
	リークチェック: 0	自己洗浄: 18	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	排水フィルター	(新型)	☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26 年 11 月 18 日

ご署名 大宮司 貴江 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

