

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 300987
作業年月日	平成 29 年 3 月 24 日	作業時間: Hr
顧客名	沼田脳神経外科循環器科病院	TEL: 0278-22-5052
所在地	群馬県沼田市栄町8	担当 用度課 西山 様
販売店	イングメディカル株式会社	担当 金子 様
納入年月日	平成 28 年 9 月 14 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/14 E200 酸素圧力異常 → 新品時説明書 添付確認

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 468
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題は有りません。今回はサニタイズ。次回より有償となります。
濃度計バルブも正常に作動しています。首接交換。濃度計バルブ1枚

装置情報	交換後運転回数: 1621 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 541	殺菌+7L: 1080
	リークチェック: 1 自己洗浄: 142	アルコール単独: 12	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン水濃度計		☒	1	給水フィルター		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	2	排水フィルター		☐	
オゾンセンサー		☒	1	PHS基盤		☒	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

西山 弘

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

