

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29 年 4 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300558
作業年月日	平成 29 年 4 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	吉祥寺あさひ病院 様		TEL： 0422-22-1120
所在地	東京都武蔵野市吉祥寺本町1-30-12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 23 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
患者用 入力値 不正修正 (14785263 → 14785262 に設定して)			
不具合原因、作業内容			
タッチパネルが2つあるのを交換しました。 Ver0205/T02c → Ver0205/T03c			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 —
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
不具合がありましたら、連絡をお願いします。			

装置 情報	交換後運転回数： 13	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 44	殺菌/消毒+7L： 748
	リークチェック： 0	自己洗浄： 373	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		29 年 4 月 25 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		ご署名 越前谷 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
H29.4.25 印	中澤