

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100145
作業年月日	平成 27 年 3 月 16 日		作業時間: 約 1.5 Hr
顧客名	わたなベクリニック		TEL: 03-5759-6789
所在地	東京都品川区西五反田4-3-1かむろ坂サンハイツ1F		担当 様
販売店	株式会社 メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 23 年 3 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 4 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 386
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記定期交換部品の交換・作動点検実施。一日のお手入れとして最後に自己洗浄モードをお願い致します。
また主電源をOFFにする場合、タッチパネルのOFFボタンをON/OFFの順でお願い致します。

装置 情報	交換後運転回数: 57670 (更新 (リセット) 実施・未実施)	殺菌: 618	殺菌+アル: 1
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

27 年 3 月 16 日
西野 正樹 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者




わたなべクリニック様

OED点検状況

NO100145

H27 3/16点検

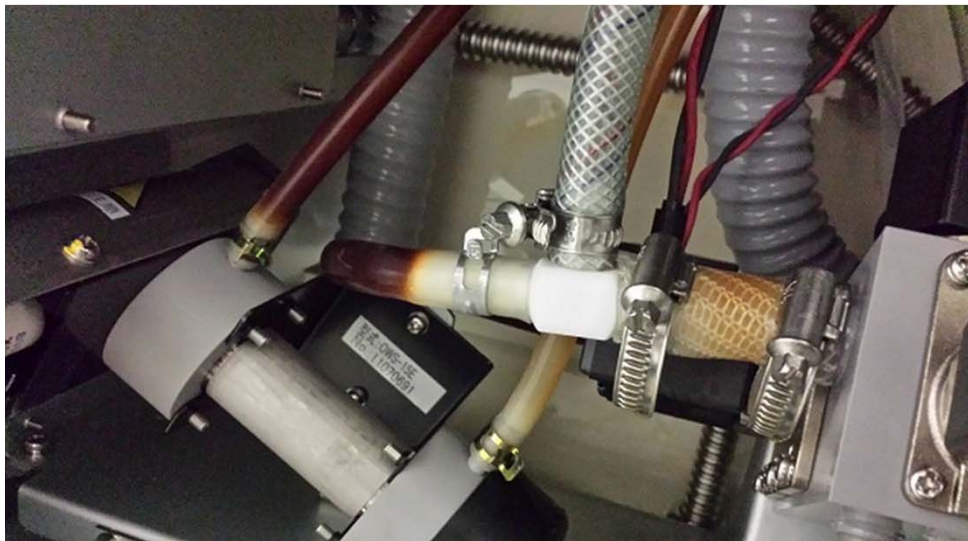

濃度計への配管が茶色い
他配管茶色変色あり。

