

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100425
作業年月日	平成 27 年 3 月 16 日		作業時間: 約 1 Hr
顧客名	村田医院		TEL: 03-3425-2612
所在地	東京都世田谷区豪徳寺 2 丁目 16-25		担当 様
販売店	株式会社 メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ (コネクタは正常に接続済み)		正常 ☐

バルブ数 400

履歴 0.75 ppm

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

下記定期交換部品の交換・作業確認実施。特に問題なし。一日の最後のお片付けして自洗装置の使用をお願い致します。また電源のOFFはタッチパネル裏面の順にOFFは頂くようお願い致します。

装置情報	交換後運転回数: 34 → 0 (更新 (リセット) 実施 ・ 未実施)	殺菌: 34	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7Lアルコール単独: 0
			エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2015 年 3 月 16 日

ご署名 村田 昌隆 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者

(西野)

(土屋)