

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.  
発行日

|       |                                          |                                                                       |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                                                       | 製造番号: 100671                                  |
| 作業年月日 | 平成 27 年 2 月 25 日                         |                                                                       | 作業時間: Hr                                      |
| 顧客名   | 東郷クリニック                                  |                                                                       | TEL: 042-670-7727                             |
| 所在地   | 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢ビル4F               |                                                                       | 担当 様                                          |
| 販売店   |                                          |                                                                       | 担当 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 25 年 2 月 4 日                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目                                | 定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                                               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

濃度値推移表 (1:300) 2/21 9/7 9/9 9/11 計4回  
77回検出率 (1:203) 6/6

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

|          |    |                                                                 |           |    |                                                              |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 755                 |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm              |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 7.5mm                    |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> JUSYIA SYSTEMS processor |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

給水の水量が少なく、開始後エアー・水・シカドール 77-150  
4-7 換気ファンが色々の部品にカカリ21才

|          |              |                  |            |          |
|----------|--------------|------------------|------------|----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 297 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 608    | 殺菌+アル: 0 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 5/3        | アルコール単独: 0 | エア単独: 0  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 2 月 25 日

ご署名 東郷 実希



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷 3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

