

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100593
作業年月日	平成 26 年 11 月 10 日		作業時間 : 約 1.5 Hr
顧客名	竹内医院 様		TEL : 0439-87-0012
所在地	千葉県富津市大堀2-14-15		担当 様
販売店	有限会社 市原器械店		担当 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☐
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

バルブ数 450

履歴 0.12 ppm

清掃 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

機器作動特に問題なし。次回はH27 11月頃点検実施予定です。
404フィルター交換。基盤交換。

装置 情報	交換後運転回数 : 507	(更新) (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌 : 1124	殺菌+7L : 0
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 382	7Lアルコール単独 : 0	エア単独 : 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1	コントロール基盤		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 11 月 10 日

千葉県富津市大堀2丁目14番15号
医療法人社団 三東会

竹内医院

ご署名

医師 竹内 修

TEL 0439-87-0011

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

西野

土屋