

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100350
作業年月日	平成 26 年 11 月 5 日		作業時間: _____ Hr
顧客名	森川内科・外科クリニック		TEL: 0282-45-2225
所在地	栃木県下都賀郡大平町新1068		担当 様
販売店	有限会社セントメディカル		担当 様
納入年月日	平成 23 年 10 月 20 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 3 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張 ・引取	修理 <input type="checkbox"/>		修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合. 異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 415
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 7/11 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		正常	<input type="checkbox"/>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

殺菌チューブ接続コネクタが破れたので交換した

装置情報	交換後運転回数: 186	更新 (リット) (実施)・未実施	殺菌: 7	殺菌+7L: 591
	リークチェック: 285	自己洗浄: 4	アルコール単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	内視鏡接続コネクタ		<input checked="" type="checkbox"/>	2
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 11 月 5 日
森川内科・外科クリニック
 ご署名 院長 森川 丘 道

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷 3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者

