

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170509
発行日 平成 29年 5月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0		製造番号：	100403
作業年月日	平成 2 9 年 4 月 1 2 日		作業時間：	Hr
顧客名	田谷医院 様		TEL：	029-823-2636
所在地	茨城県土浦市生田町3-27		担当	
販売店			担当	様
納入年月日	平成 24年 2 月 15日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☒ 5年 5回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	オーバーホール ☒		修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検 および オーバーホール

不具合原因、作業内容

ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 L E D	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 360
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・ 交換部品の詳細は別紙「100403号 工事写真」をご参照ください。

・ タッチパネルを交換しましたが、操作上の変更はありません。

装置 情報	交換後運転回数：1859⇒6		更新（リセッ） 実施 ・未実施		殺菌：	6647	殺菌＋ﾌﾙ：	2389
	リークチェック：	347	自己洗浄：	1335	ﾌﾙｺｰﾙ単独：	51	工ﾌﾞ単独：	326

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	1 式	マニホールド 電磁弁		☒	1 式
メインポンプ、排水ポンプ		☒	1 式	酸素電磁弁		☒	1 式
ドレンバルブ ASSY		☒	1 式	アルコールライン電磁弁		☒	1 式
タッチパネル（カラー型）		☒	1 台	配管バルブ、フタバルブ		☒	1 式
シリコンチューブ		☒	1 式			☐	

修理業者 株式会社 I H I シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL：086-944-6528

責任技術者	作業者
	H29. 4. 12 笹崎

1: 定期交換部品 一式



2: メインポンプ、排水ポンプ、タッチパネル、マニホールド電磁弁、酸素電磁弁、アルコールライン電磁弁



3: シリコンチューブ、ドレンバルブASSY、配管パッキン、フタパッキン

