

点検・修理報告書

管理 No. 19147
発行日: 2020年2月27日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/2/21 作業時間: 16 Hr
顧客名	聖路加国際病院 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100148	運転回数: 2409回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
①缶内に水が残る。		
②乾燥が悪い。		
③右側の足が曲がっている。		
原因		
①BDモード、FLASHモードでは乾燥時間が1分のため、水が残留いたします。		
②真空ポンプの吸引ラインに若干の漏れがありました。		
③強い衝撃がかかったと考えられます。		
処置、作業内容		
①これは正常な状態ですので、ご理解をお願いします。		
②配管を増し締めし、漏れをなくしました。乾燥効果を改善したプログラムをご用意できましたので、導入させていただきました。		
③新品のアジャスタと交換させていただきました。		
特記事項		
・真空弁と排気弁にうなり音が発生していましたので、新品交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	排気弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 3 月 25 日
聖路加国際病院 歯 科
口腔外科

東京都中央区明石町9-1

電話 3541-5151

印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
効 '20/02/27 池	富 '20/02/27 田	三 '20/02/27 宅