

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 130322

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	埼玉県所沢市小手指町 4-1-1		機番	000439
環営	ユーザー名	彩のクリニック 様		納入日	平成16年7月28日
	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成18年9月
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成25年3月20日

経緯・修理内容

平成18年8月18日 エラー4（水位レベルセンサー異常）にて機械をお預かりしました。
 平成18年8月25日 不具合対策プログラム Ver5 に交換して返却しました。
 平成18年8月 エラー4 が再発し工場に引き上げました。

不具合原因（故障箇所）と処置


この度は修理機の返却が遅れまして、大変申し訳ありませんでした。
 不具合部品の交換と点検整備を行いましたので、引き続き本機をお使いいただきますよう
 お願いいたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位レベルセンサーの制御部品に不具合があり、これを交換して復旧しました。
 水位レベルセンサー本体も交換いたしました。

写真：交換部品一式

水位レベルセンサー
 コントロール基板
 排水シリコンチューブ

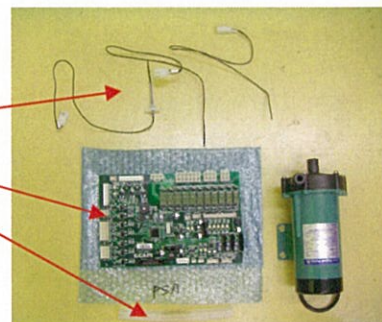

〔2〕修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.46～0.52 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
 酸素濃度：92.1% 酸素流量：0.75 L/min（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認

安
25.3.22
田

審査

中
25.3.22
澤

作成

H25. 3. 22
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1	
	水位レベルセンサー（L、H、HH）	3	
	水ポンプ（P-1）	1	オゾン水製造用ポンプ
	排水シリコンチューブ	1	