

中津川循環器内科クリニック 様

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者： 菅田 和樹

点検年月日	平成 28年 8月 24日	機種名	ONW-10	製造機番	000897
設置場所				TEL :	028-675-7521
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
ランプ類				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄動作				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input checked="" type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度 :	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度 :	93 % 流量 : 0.78 L/min 圧力 : 0.09/ ~ 0.17 / MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
清掃				
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2016年 8月 24日
〒329-0235 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2388-5
TEL028-675-7521 FAX028-675-7531

医療法人中津川会
中津川循環器内科クリニック

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。院長 中津川 昌利