

藤倉医院

御中

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者: 中村

|       |                 |      |        |                   |        |
|-------|-----------------|------|--------|-------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成 28 年 8 月 9 日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番              | 000639 |
| 設置場所  |                 |      |        | TEL: 048-592-3045 |        |
| 設置時期  | 平成 年 月 日        | 使用時間 |        | 御対応者              |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                              |                          |
|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                              |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類       |      |                                     |                                              |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                              |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                              |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 0.4 mg/L                                 |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 95.1% 流量: 0.82 L/min 圧力: 0.110~0.186 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                              |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                              |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品       |                                        | 数量 | コメント |
|------------|----------------------------------------|----|------|
| 吸着筒        | 交換 <input type="checkbox"/>            | 一式 |      |
| 吸湿筒        | 交換 <input type="checkbox"/>            | 一式 |      |
| ドレン用フィルタ   | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
| オゾン分解触媒    | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
| 排水シリコンチューブ | 交換                                     | 一個 |      |

28年 8月 9日

ご署名

中村

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。