

武蔵村山さとうクリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者:

(星住)

点検年月日	平成28年 8月 5日	機種名	ONW-10B	製造機番	001450
設置場所				TEL	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素配管	正常	☒			
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
	交換 ☐		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

28年 8月 5日

ご署名 山崎 優子



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10B 作業チェックリスト

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部

日付: 2016年 8月 5日 作業者 星住

ONW-10B 機番: 00145

客先: 武蔵村山せいとうクリエック様

定期交換部品	
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
酸素ガス配管確認	
ポンプレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか	合/否
ポンプレギュレータの二次側圧力は正常か(0.21~0.29Mpa)	合/否
酸素ポンベ~ONWまでの配管に漏れは無いか	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (L/min)	合/否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
確認試験	
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)