

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 4 月 1 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 3 月 30 日		作業時間： Hr
顧客名	川崎ハッピー歯科 様	TEL： 044-201-8249	
所在地	神奈川県川崎市川崎区宮前町8-1 マツバラビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090182	運転回数： 5501
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー25 滅菌温度高温異常		
原因		
・ドレン弁に接続されているチューブに亀裂あり		
そこが原因でわずかながら熱や蒸気がリークし排出しきれずエラー発生		
処置、作業内容		
・チューブ交換		
・各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 8 日

ご署名 藤原 隆 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-8528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	藤原PJサービス 20/04/01 富田	藤原PJサービス 20/04/01 安田