

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-62752

No. 170821

配布先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	かなたクリニック 様	機番	300820
環営	所在地	神奈川県横浜市瀬谷区中央 6-20	納入日	平成 28 年 3 月 18 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	平成 29 年 7 月 24 日
	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 29 年 8 月 16 日
計	3			

修理依頼・不具合内容

消毒運転（水槽に処置具入れた状態）・「排水、エアージ中です」が表示して運転が終わらなかった
自己洗浄（水槽に何も無い状態）・・・「洗浄中です」が表示して運転が終わらなかった

- ・7/24 新鋭工業殿が立ち会いた時、3回運転しても再現しなかった
- ・7/24～8/21 まで間、修理代替機は正常に動いている
- ・異常履歴に「排水異常」は記録されていない

不具合原因（故障箇所）と処置


[1] 画面表示につきまして

水槽の水位センサーが「水」や「物」を検知すると排水ポンプが動き出し、画面で「排水、エアージ中です」、「自動排水中です」が表示されます

[2] 点検結果

運転条件を振って確認しましたが、不具合は再現しませんでした。状況から水位センサー系統の検知不具合と判断し、関係する部品も含めて交換いたしました。これで様子を見てくださいますようお願いいたします。

写真：交換部品一式

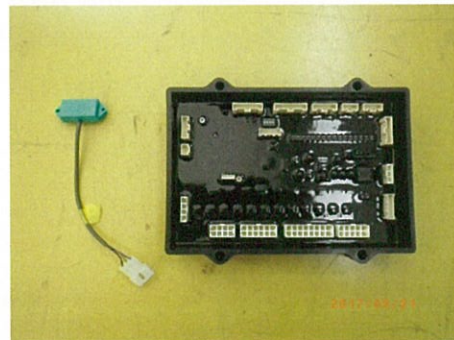

[3] 作業内容

- 1：分解点検および部品交換、清掃
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の運転情報・・・交換後運転回数：346 殺菌：1121 殺菌＋アルコール：0
リークチェック：2 自己洗浄：308 アル単独：0 エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー（LVL）	1 個	
	コントロール基板	1 枚	

承認

安
17.8.21
田

審査

中
17.8.21
澤

作成

H29. 8. 21

中澤

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528