

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-54209

No. 170824

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	高沢胃腸科外科 様	機番	300348
環営	所在地	群馬県太田市新井町 567-1	納入日	平成 26 年 7 月 29 日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	
	受付日		平成 29 年 7 月 20 日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 29 年 8 月 23 日

修理依頼・不具合内容

消毒運転中に水漏れ （機械の左側のキャスター部分）

※新鋭工業殿が現場と支店にて確認したところ、水漏れは再現しなかった。

※機械内部に水が漏れて乾いた痕跡あり。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

工場で下記の確認をしましたが、水漏れは再現しませんでした。

- 1：目視検査・・・水漏れ跡や水系統の機器に異常が無いか確認する。
- 2：通常運転・・・運転条件（水量、水圧）を振って5回運転する。
- 3：検査運転・・・「水漏れ検査」モードで5回運転する。
- 4：水密性確認・・・水槽を満水にして5日間静置する。

直接的な原因は判明しませんでした。内部の痕跡から判断して水漏れに関する部品を交換いたしました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：運転プログラムバージョンアップ・・・Ver0204⇒0207
濃度計ウォーミングアップ条件を見直しました。
- 3：オゾン水濃度・・・正常 殺菌履歴：0.68ppm（基準：0.5～0.9ppm）
- 4：運転確認・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	パッキン	1 式	アッパーカバー側
	レベルセンサ ASSY	1 個	HH
	コントロール基板	1 枚	
	タッチパネル	1 台	カラー型

承認



審査



作成

H29. 8. 24

中澤

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528