

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-61322

No. 170824

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	妹尾内科 様		機番	100206
環営	所在地	千葉県船橋市高根台 6-2-22		納入日	平成22年11月8日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成29年7月21日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成29年8月18日

修理依頼・不具合内容

・水漏れ

運転回数・・・殺菌；1603、殺菌+アルコール；4227、リークチェック；4206、自己洗浄；205


不具合原因（故障箇所）と処置

この度は水漏れを発生させてしまい、大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします

〔1〕点検および作業内容

機械内部のオゾン水が通るホースが硬化し、そこから水漏れしていました（写真）
このホースと周辺のチューブを交換して復旧しました。
経年劣化と思われますが、より耐久性のあるホースを検討してまいります。

写真：水漏れ箇所

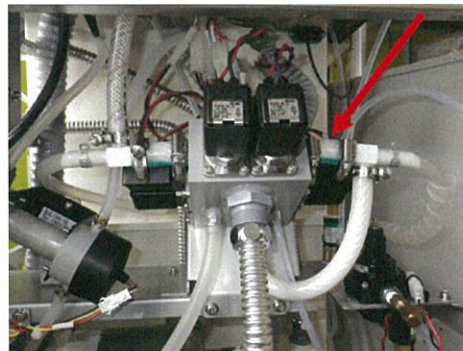

〔2〕作業内容

1：部品交換・・・下表をご参照ください

〔3〕性能確認

1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
2：運転確認・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	マニホールド周辺ホース	5本	
	水槽	1式	
	タッチパネル	1台	カラー型

承認



審査



作成

H29. 8. 24

中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528