

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-61312

No. 171220

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
所在地	東京都目黒区目黒3-1-7 202号			機番	001341
ユーザー名	村林クリニック 様			納入日	平成19年03月30日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成29年09月08日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成29年12月18日

修理依頼・不具合内容

モータ（水ポンプ）異音および各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異音の原因である水ポンプを中心に、故障した部品を交換しました。

写真1：No. 1～4 水ポンプ、吸着吸湿筒

写真2：No. 5～8 ドレンフィルター、触媒、ほか



[2] 修理・点検内容

1. 分解点検、部品取付、運転検査および清掃作業

2. オゾン水濃度測定：0.40～0.54mg/L・・・正常

3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.082～0.208 MPa（AC100V 50Hz）

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1～3	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
4	吸着筒、吸湿筒	1式	SPS10424→SPS12215
5	ドレンフィルターASSY	1個	
6	オゾン分解触媒	1個	
7	配管チューブ、パッキン	1式	
8	オゾンセンサー	1個	

承認



審査



作成

H29.12.20

中澤