

点検・修理報告書

管理 No.

20634

発行日： 2020年12月16日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020年12月8日	作業時間：	8 Hr
顧客名	川手歯科医院 様	TEL：	047-422-2878
所在地	千葉県船橋市本町1-26-19	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2018 年 8 月 22 日 保証期間 内 □ 外 ■	付属品	
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 年 回目	定期点検シール記入	□
出張・引取	修理 ■ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付	□

装置情報	製造番号： 100339	運転回数： 1278回	
------	--------------	-------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー26 停電異常が発生した。

原因

・サーフィットプロテクタが作動し、電源が切れしておりました。
 ・製品には異常はありません。サーフィットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、
 正常な運転状態で作動してしまいました。

処置、作業内容

・サーフィットプロテクタを新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーフィットプロテクタ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
			※定期メンテナンスに含む		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R.3年1月8日

ご署名 川添 真美

印

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	品証	責任技術者	作業者
		菊 '20/12/16 池	富 '20/12/16 田	三 '20/12/16 宅

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

名称 お客様 住所 納入場所	川手歯科医院 千葉県船橋市本町1-26-19 同 上	製造番号 機種 運転回数	100339 1278 回	点検実施日 実施者	2021年1月7日 IHIアグリテック 三宅	ご承認印	い シ カ ム
		サービス形態	定期保守点検	モリタ 担当者			

計装(安全)

 圧力計ゼロ設定

ドア

 ブラケットの接続状況確認 ドアカバーのねじ締みの確認 ドアセンサ作動確認 ドアロックセンサ作動確認 ドアロックピンの動きの確認 内蓋のキズ・汚れ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 缶内温度センサの汚れ トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

 テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ 給気弁の動作確認 排蒸弁の動作確認 真空・排気弁の動作確認 蒸気弁の動作確認(3万弁) 回水弁の動作確認(3万弁) 排水コネクタの漏れ・破損 安全弁(缶内)の漏れ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ フジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

 ソケット他溶接割れ・漏れ 蒸気発生器からの漏れ ヒーター取り付け状態・漏れ サーモスタートの設定温度確認 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ ソケット他溶接割れ・漏れ 蒸気発生器からの漏れ ヒーター取り付け状態・漏れ サーモスタートの設定温度確認 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

 給水タンクの損傷・漏れ シリコンチューブの折れ、裂けの確認 蓋の損傷・割れ フロートセンサー(L)の作動確認 フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

 タンクの汚れ・漏れ フロートスイッチの作動確認

電装系

 タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ ディスプレイの色あせ・表示確認 電源スイッチの作動状態 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ 各基板のコネクター締み確認 端子の締み・コネクターの接続確認 配線の変色・損傷有無・結束状態 圧力センサーの取付け状態・入力確認 SD基板の腐食の確認

外装・設置

 設置場所の水平確認 本体のフロント側が高いことの確認 アジャスターの締み・破損の確認 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新 SDカードへの書き込みの確認

消耗品

 ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

 B & Dテスト実施 コンパクトPODによる判定 TEST/バキューム 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

合 否

インジケータ貼り付け

【  】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
IC Clave用ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030