

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171230
発行日：平成 29年 12月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100658
作業年月日	平成 29 年 12 月 30 日		作業時間： 1.0 Hr
顧客名	新島スカイクリニック 様		TEL： 029-433-5511
所在地	茨城県日立市鮎川町3-1-21		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 1 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
12/22 光量低下異常、ランプ切れ異常 (各1回発生)			
12/28 〃 〃 (各4回発生)			
12/29 〃 〃 (各3回発生)			
不具合原因、作業内容			
オゾン水濃度計の UVランプの点灯不良が原因でした			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 526
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項			
オゾン水濃度計 (UVランプ含む) を交換して復旧しました。			

装置 情報	交換後運転回数： 363	更新 (リット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 5787	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1185	7Lコル単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
ガン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	
ガン水濃度計用フィル		☒				☐	
ガンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄		29 年 12 月 30 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 新島 光太郎 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤 77.12.30	2017.12.30 中澤