

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180116
発行日：平成 30 1月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100232
作業年月日	平成 30 年 1 月 10 日	作業時間： Hr
顧客名	みずほ台病院 様	TEL： 0492-52-5121
所在地	埼玉県富士見市西みずほ台2-9-5	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 23 年 7 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・ <u>引取</u>	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検 および オーバーホール			
不具合原因、作業内容			
ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 428
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
・交換部品の詳細は別紙「100232号 工事写真」をご参照ください。			
・タッチパネルを交換しましたが、操作上の変更はありません。			

装置 情報	交換後運転回数：2187→5 更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 6142	殺菌/消毒+アル： 5580
	リークチェック： 107 自己洗浄： 1791	アルコール単独： 173	エア単独： 27

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	1 式	酸素、給水電磁弁		☒	1 式
メイン、排水、エアポンプ		☒	1 式	アルコールライン電磁弁		☒	1 式
排気ファン		☒	1 台	配管パッキン、フタパッキン		☒	1 式
ドレンバルブ ASSY		☒	1 式	タッチパネル (カラー型)		☒	1 式
マニホールド 電磁弁		☒	1 式	トレ ASSY		☒	1 式

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
工場点検につき不要です	
ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者

1:定期交換部品 一式



2:ポンプ類、ドレンバルブASSY、マニホールド電磁弁、酸素、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁



3: 配管パッキン、フタパッキン、タッチパネル、トレイASSY

