

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300987
作業年月日	平成 29 年 10 月 12 日	作業時間： Hr
顧客名	沼田脳神経外科循環器科病院 様	TEL： 0278-22-5052
所在地	群馬県沼田市栄町8	ご担当 様
販売店	イングメディカル株式会社	ご担当 金子 様
納入年月日	平成 28 年 9 月 14 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/14 E:200 O₂圧異常 ⇒ デモ取扱時向け

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒ 0~1
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☐
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒ 清掃 ☐
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒
 マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

バルブ数 46x

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませぬ。
 ハシロ ケーブル (ZuA170 CA-503 B/C) 2台170用意

装置 情報	交換後運転回数： 1716	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 1104	殺菌/消毒+アル： 2233
	リークチェック： /	自己洗浄： 298	アルコール単独： 22	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☒	/
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	/
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾンセンサー		☒	/	給水・排水フィルタ		☒	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

阿部 愛美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

