

日鼻医院

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 中村

点検年月日	平成 29 年 1 月 13 日	機種名	ONW-10	製造機番	001565
設置場所				TEL: 0792-51-0633	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.2% 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.078~0.145 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	ユーザー様より、エラー2あるのは、残り2分の行程で動作が止まった事があったとの事です。 以前洗浄後、槽内に泡が残っていたとの事です。 点検時再現はありませんでした。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

29 年 1 月 13 日

ご署名 日鼻 研

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。