

小作駅前クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部「フィルタ-」ランプが毎回点滅する（通常12回点滅で
点滅します）

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成29年 2月 22日	機種名	ONW-10	製造機番	: 000351
設置場所	東京都羽村市小作台5-9-10			TEL	: 042-578-0161
設置時期	平成16年1月28日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.4	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：	92.7	%	流量：0.72 L/min 圧力：0.093～0.166 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	1	フィルタ-ランプ点滅は再現しませんでした。 このままご使用いただき、再現したら 連絡をお願い致します。
ドレンフィルタ	1	
吸着筒、吸湿筒	1	
配管チューブ・パッキン	1	
※ 3スベール使用済み		

平成 29 年 2 月 22 日
ご署名 中澤 裕 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。