

村谷胃腸科医院 御中

点検確認書

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部

点検担当者: 角田 孝田

点検年月日	平成29年11月21日	機種名: ONW-10	製造機番 001610
設置場所			TEL:
設置時期	平成 年 月 日	運転回数	御対応者

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	9.12 % 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.77~1.48 MPa		
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一個	右側ふた、ハズレ破損あり。
吸湿筒	交換 ☒	一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
水位センサー	交換 ☒	一個	
排水ホース	交換 ☒	一個	

H29年11月21日

ご署名

角田 孝田

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。