

日鼻医院

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 中村

点検年月日	平成 27 年 10 月 6 日	機種名	ONW-10	製造機番	00/565
設置場所				TEL: 0492-51-0633	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 95.2 % 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.112~0.192 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個
コントロールキパン	交換 ☒	一個

27 年 10 月 6 日
埼玉県富士見市鶴瀬西2-4-13
ご署名 日鼻医院 TEL 049 (251) 0633 印

日鼻 靖

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。