

## クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

|     |      |              |        |              |        |              |      |                                                                                     |
|-----|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称   | 聖路加国際病院      | 製造番号   | 100148       | 点検実施日  | 2021年1月15日   | ご承認印 |  |
|     | 住所   | 東京都中央区明石町9-1 | 運転回数   | 602 / 2867 回 | 点検実施者  | IH アグリテック 三宅 |      |                                                                                     |
|     | 納入場所 | 歯科口腔外科 外来    | サービス形態 | 定期メンテナンス     | モリタ担当者 | モリタ東京本社      |      |                                                                                     |

## 計装(安全)

☒ 圧力計ゼロ設定

## ドア

- ☒ ブラケットの溶接状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内室のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

## 缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 缶内温度センサの汚れ
- ☒ トレー・棚・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ
- ☒ 缶内フィルタの損傷・汚れ

## 配管系

- ☒ テフロンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の動作確認
- ☒ 排気弁の動作確認
- ☒ 真空・排気弁の動作確認
- ☒ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 回水弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 排水コネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(缶内)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

## 真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(P1)の確認

## 給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブの折れ・裂けの確認
- ☒ 蓋の損傷・割れ
- ☒ フロートセンサー(L)の作動確認
- ☒ フロートセンサー(H)の作動確認

## 排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動確認

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ SD基板の腐食の確認

## 外装・設置

- ☒ 設置場所の水平確認
- ☒ 本体のフロント側が高いことの確認
- ☒ アジャスタの緩み・破損の確認
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- ☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- ☒ SDカードへの書き込みの確認

## 消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

## 性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ コンバクトPCDIによる判定
- ☒ TESTバキューム
- ☒ 温度センサーの調整(VR調整)

| 運転確認 |   |
|------|---|
| 合    | 否 |

インジケータ貼り付け

【  】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品    | 数量 |
|---------|----|
| ・ドアパッキン | 1  |
| ・圧力センサー | 1  |
|         |    |
|         |    |

## 株式会社IH|アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030