

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171108

発行日：平成 29年 11月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号： 100515
作業年月日	平成 29年 11月 6日	作業時間： Hr
顧客名	よこた内科・消化器科 様	TEL： 03-3977-3391
所在地	東京都板橋区成増3-48-23	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 24年 8月 22日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・ <u>引取</u>	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期保守点検 および オーバーホール

不具合原因、作業内容
ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハル数 444
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・交換部品の詳細は別紙「100515号 工事写真」をご参照ください。
・タッチパネルを交換しましたが、操作上の変更はありません。

装置情報	交換後運転回数：1296→5 更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 5194	殺菌/消毒+7L： 5958
	リークチェック： 1 自己洗浄： 1330	アルコール単独： 0	エア単独： 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		<input checked="" type="checkbox"/>	1式	酸素、給水電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
メイン、排水、エアポンプ		<input checked="" type="checkbox"/>	1式	アルコールライン電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
排気ファン		<input checked="" type="checkbox"/>	1台	配管パッキン、フタパッキン		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
ドレンパルプ ASSY		<input checked="" type="checkbox"/>	1式	タッチパネル (カラー型)		<input checked="" type="checkbox"/>	1式
マニホールド 電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1式	フロントパネルASSY		<input checked="" type="checkbox"/>	1枚

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
	工場点検につき不要です
ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)  
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6  
 TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者

1:定期交換部品 一式



2:メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ、ドレンバルブASSY、排気ファン



3:配管パッキン、フタパッキン、電磁弁類、フロントパネルASSY、タッチパネル

