

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171115
発行日：平成 29年 11月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100482
作業年月日	平成 29 年 11 月 13 日		作業時間： Hr
顧客名	砂長胃腸科外科医院 様		TEL： 027-373-2263
所在地	群馬県高崎市稲荷台町1305-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検 および オーバーホール			
不具合原因、作業内容			
ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 574
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・交換部品の詳細は別紙「100482号 工事写真」をご参照ください。			
・タッチパネルを交換しましたが、操作上の変更はありません。			

装置 情報	交換後運転回数：1756→5	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 10583	殺菌/消毒+アル： 1
	リークチェック： 0	自己洗浄： 38	アルコール単独： 0	エア単独： 99

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	1 式	酸素、給水電磁弁		☒	1 式
メイン、排水、エアホソフ		☒	1 式	アルコールライン電磁弁		☒	1 式
排気ファン		☒	1 台	配管バッキング、フタバッキング		☒	1 式
ドレンバルブ ASSY		☒	1 式	タッチパネル（カラー型）		☒	1 式
マニホールド電磁弁		☒	1 式			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
工場点検につき不要です	
ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック（旧社名 IHI シパウラ）
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者

1:定期交換部品 一式



2:ポンプ類、ドレンバルブASSY、マニホールド電磁弁、酸素、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁



3:配管パッキン、フタパッキン、タッチパネル

