

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-60590

No. 171117

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	ONW-10
所在地	神奈川県横浜市磯子区杉田 1-20-19	機番	001637
ユーザー名	林内科医院 様	納入日	平成21年07月28日
点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成29年03月15日
返送先	納入先と同じ	出荷日	平成29年11月03日

修理依頼・不具合内容

各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

劣化した部品を交換し、分解清掃いたしました。

No. 1～3：水ポンプ

No. 4～5：配管チューブ、パッキン、水位レベルセンサー



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.44～0.62 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.7% 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.115～0.206 MPa（AC100V 50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・5526

交換部品

番号	部品名称	数量	備考
1	オゾン水製造ポンプ	1台	P-1
2	内視鏡洗浄ポンプ	1台	P-2
3	排水ポンプ	1台	P-3
4	配管チューブ、パッキン	1式	
5	水位レベルセンサー	3本	

承認



審査



作成

H29.11.17

中澤