

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300351
作業年月日	平成 29 年 11 月 8 日	作業時間： 5 Hr
顧客名	豊島園大腸肛門科 様	TEL： 03-3998-3666
所在地	東京都練馬区春日町4-6-14	ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社	ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 11 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
水漏れ（本体左奥、右手前）			
不具合原因、作業内容			
本体内部に水漏れ跡あり。消毒槽及びライン上に問題なし。接面部より漏れの可能性あり。			
水漏れ対策実施（消毒槽及びアッパーカバー接面部強化）			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 369
オゾンセンサ	正常 ☒ 0-1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 前回点検時確認済み
トレイ	正常 ☒ 前回点検時確認済み	殺菌チューブ類	正常 ☒ 前回点検時確認済み
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
現場確認が出来なかった為、引き上げての作業を致しました。消毒槽からの漏れではない為、接面部強化。			
また、タッチパネルを無償にて交換を実施しました。			

装置 情報	交換後運転回数： 536	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 5089	殺菌/消毒+アル： 411
	リークチェック： 0	自己洗浄： 884	アルコール単独： 5	エア単独： 24

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☐		給水・排水フィルタ		☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
	