

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100515
作業年月日	平成 25 年 12 月 26 日		作業時間: Hr
顧客名	よこた内科・消化器科		TEL: 03-3977-3391
所在地	東京都板橋区成増3-48-23		担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社		担当 中村 様
納入年月日	平成 24 年 8 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
オゾンリーク異常 7/27 × 3 7/28 × 1

不具合原因、作業内容
OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 356
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.94 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 7/27 7/28 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
7/27 7/28 清掃、フロントパネル上部に積み、塗装のはがれあり、注。
装置内部、配線状態異常なし。8~9月のメンテナンスに要約。12月8~9月経、10/05→12/07

装置 情報	交換後運転回数: 172	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 1081	殺菌+7L: 2228
	リークチェック: 0	自己洗浄: 383	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	25 年 12 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	よこた内科・消化器科印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	